


ヘルスケア 緊急呼出カタログ

Vol.2

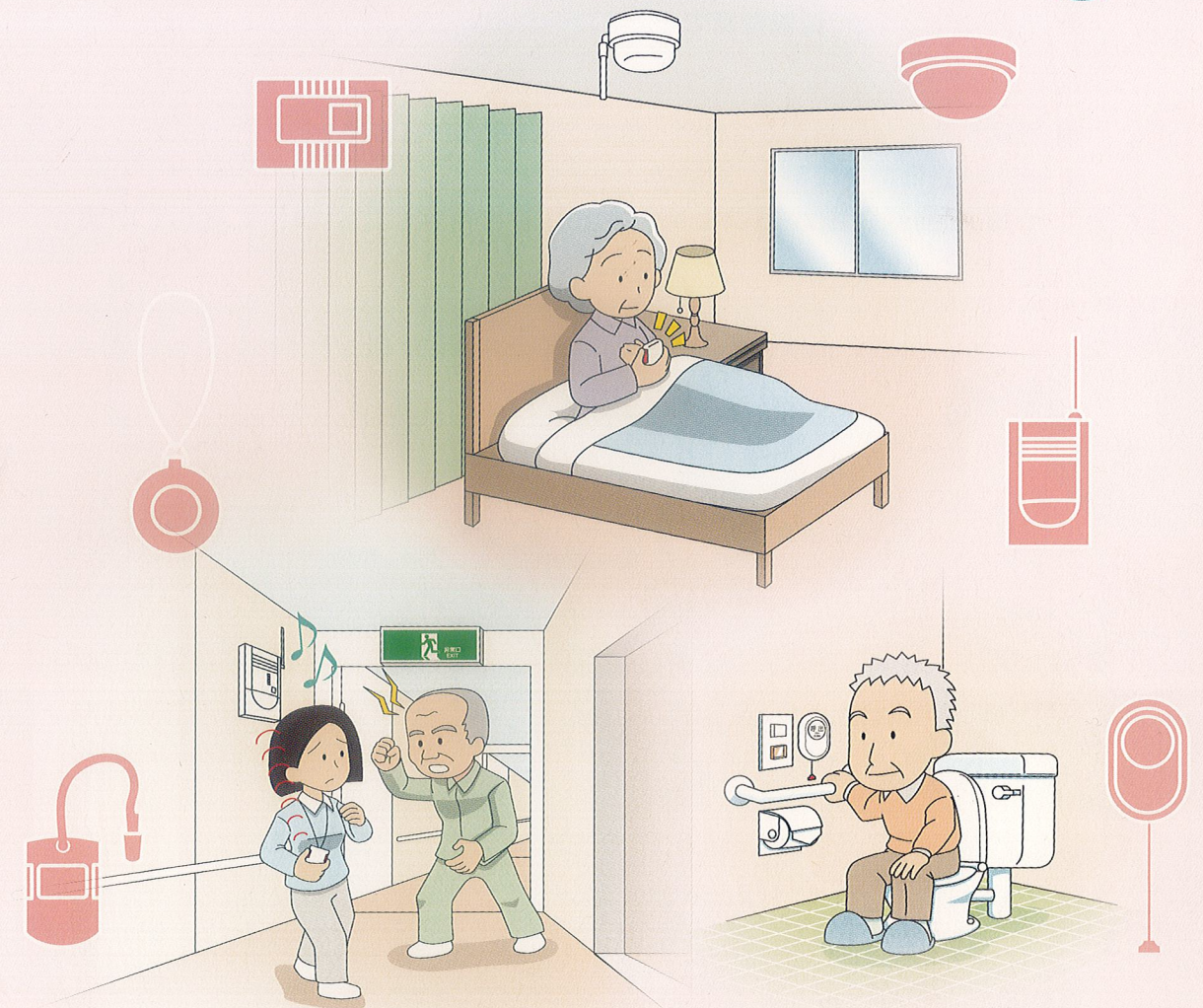

センサーが快適な生活をお手伝い

老人福祉施設

高齢者専用住宅

病 院

公共施設

自 宅

様々なシステムを施設別・用途別にご提案いたします

もしもの時の

当社の機器には「微弱電波」と

- 電波を使用し、コードレスを実現！
- 送信機、受信機間は

アクセスコールシリーズ

微弱電波
8mタイプ

特長

- 送信機から受信機までの距離は、最大約8mです。
- 電波登録不要で、送信機・受信機の台数に制限はありません。
- 微弱電波のため、位置確認できます。

用途

- 病院や高齢者住宅等での病院（居室）や共用部からの呼出に！
- 職員が送信機を携帯し、緊急時の呼出に！
→電波到達距離が短いため、呼出位置を特定したい場合に適しています。


共用部での呼出位置特定に！



職員の緊急呼出に！



見通し約8m

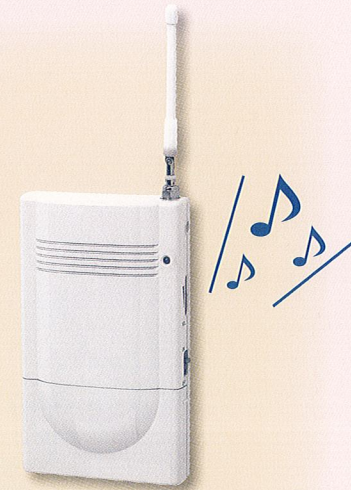

アクセスコール受信機
AC-1R

送信機



AC-P2



AC-PT



AC-WT

受信機



AC-1R



AC-4R



AC-8R

CONTENTS

アクセスコール緊急呼出し P.4

ヘルスケア用機器の電波強度について

◎微弱電波とは

電波到達距離は見通し約8m(12m)。
315.8MHzの周波数を使用。

微弱電波商品

▶▶ アクセスコールシリーズ

◎小電力電波とは

電波到達距離は見通し約100m。
426MHzの周波数を使用。

小電力電波商品

▶▶ ワイヤレス(小電力シリーズ)

緊急呼出に！

「小電力電波」を採用しています。

- 配線工事不要です。
- 送信機は、電池式で交換も簡単です。

ワイヤレス(小電力)シリーズ

小電力電波
100mタイプ


特長

- 送信機から受信機までの距離は、最大約100mです。
- 登録式で、送信機を受信機に登録して使用します。
(セット商品は、電波登録済です。送信機、受信機とも増設できます。)
- 電池切れ報知機能付き！

用途

- ご家庭内での、緊急時の呼出に！
- 施設内の部屋やトイレ、点滴室から、管理室への呼出に！
→電波到達距離が長いため、ご家庭や大規模施設での呼出に適しています。
(呼出位置は特定できません)

施設内での呼出に！

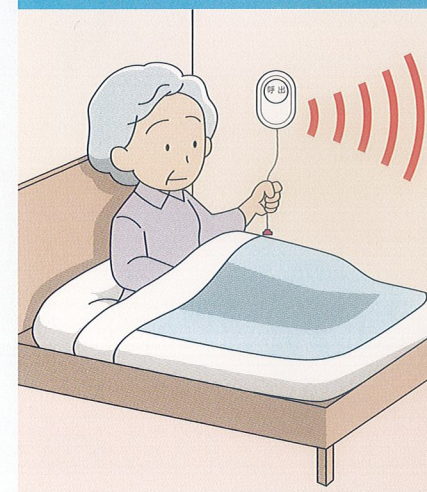

ご家庭内で！



見通し約100m

メロディと
フラッシュで
お知らせ



卓上型受信機
HC-350

送信機



TX-30



TX-110



TX-113



TX-122

受信機



HC-350



RX-50K

ワイヤレス緊急呼出し P.7

(社)電波産業会発行「携帯電話端末等の使用に関する調査報告書」による、携帯電話の送信出力数値と当社使用の電波を比較しております。電波強度を認識いただき、医療器具や人体に及ぼす影響についてご判断ください。

機種	微弱電波採用機器	小電力電波採用機器	携帯電話
送信出力	0.005mW	10mW	800mW
比較※	1/160,000	1/80	1

※比較は携帯電話を「1」とした場合

アクセスコールシリーズ

微弱電波
8mタイプ


アクセスコール緊急呼出し

呼出位置を特定出来ます！

特長

- 電波到達距離は最大約8mです。
- 緊急時に送信機のボタンを押すと、管理人等にお知らせします。呼出位置確認ができ、早急な対応が可能です。
- 押しボタン送信機は持ち運びできます。

システム

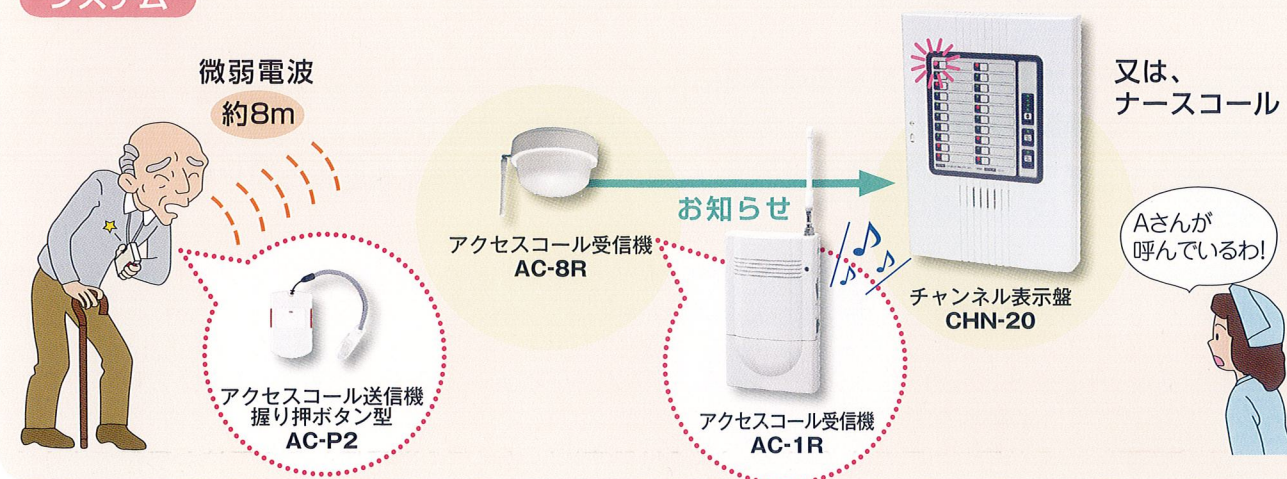


用途例1 病院や高齢者専用住宅のナースコールとして！


メリット

- 無線コードレスなので、コードによるつまづきなどを回避します。
- 共同フロアでの呼出位置を特定できます。


居室のどこからでも呼出できます。

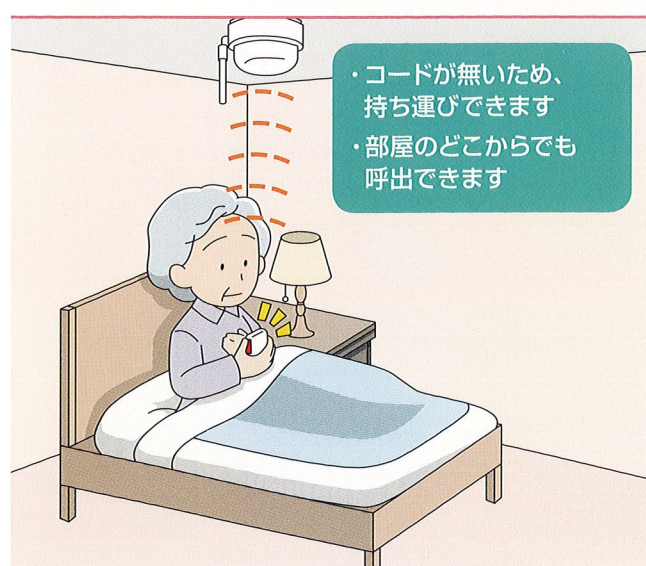

透析室など、ベッドが可動する所

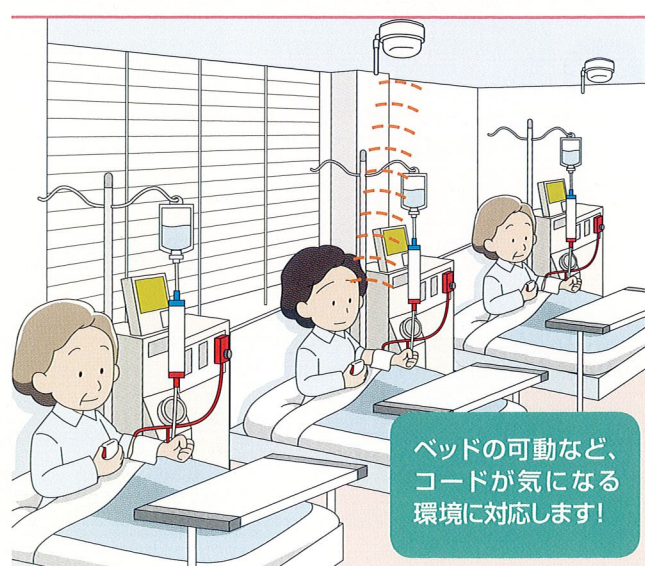

共同フロアでの呼出位置を特定できます！

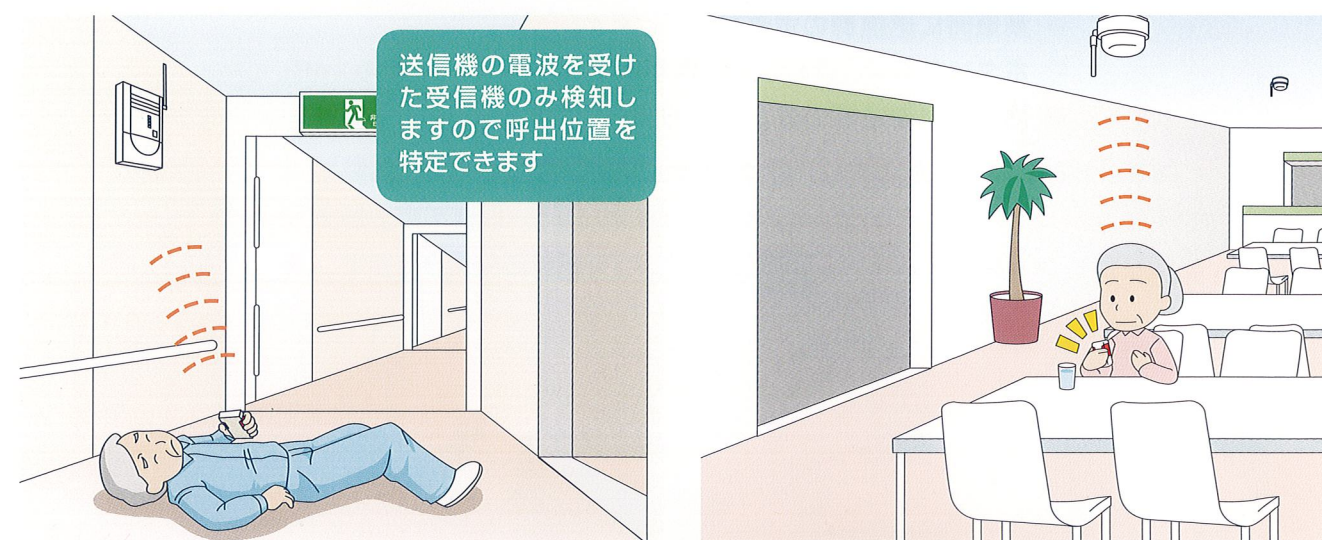

システム事例

高齢者住宅 呼出しシステム

特長

- AC-8Rの「外部出力チャンネル設定」により、左右上下階の受信機の電波干渉を防ぐことが出来ます。(1~15ch 振分け)
- 共同フロアでは、全チャンネルON設定にし、すべての送信機からの電波を受信できます。

アクセスコール受信機
AC-8R




美観を意識した天井型デザイン。

アクセスコール送信機
押しボタン型
AC-P2



2つ同時押しタイプ。緊急時に押しやすいです！

システム

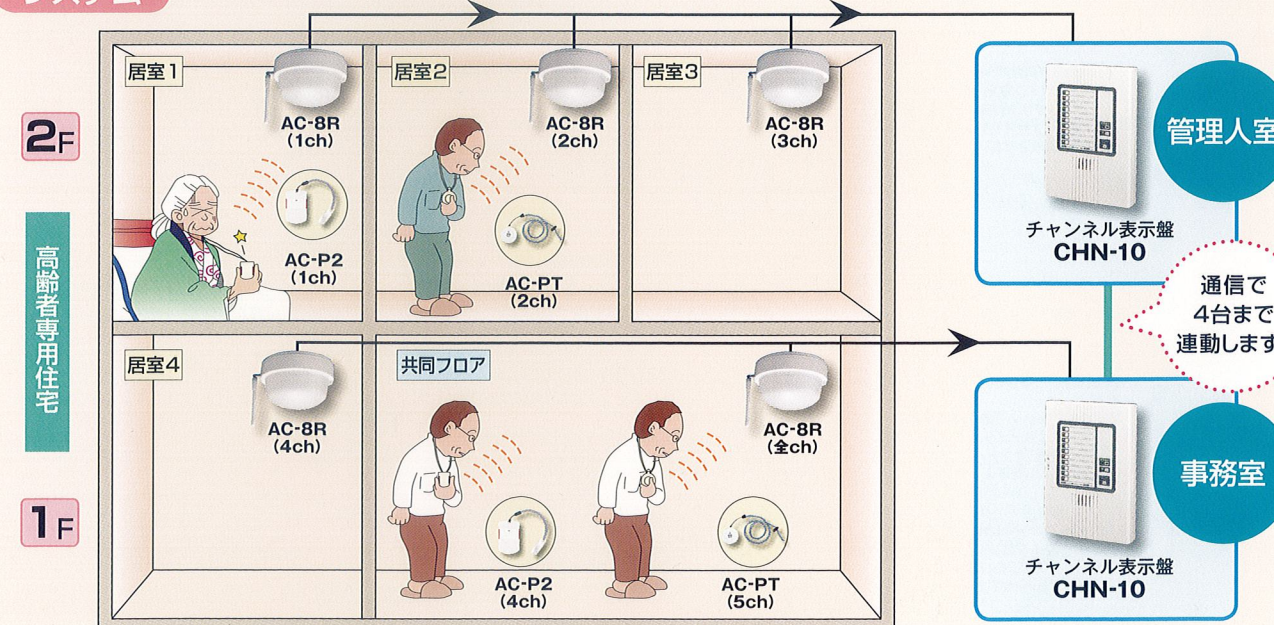


用途例2

職員の緊急呼出用途に！ 緊急事態から職員を守ります。

特長

- 緊急時に送信機のボタンを押します。
- ボタンを押すと近くの受信機が鳴動します。(AC-1R/AC-4R)
- 同時に管理室等の表示盤にお知らせします。

➡ 早期発見・対応が可能です。

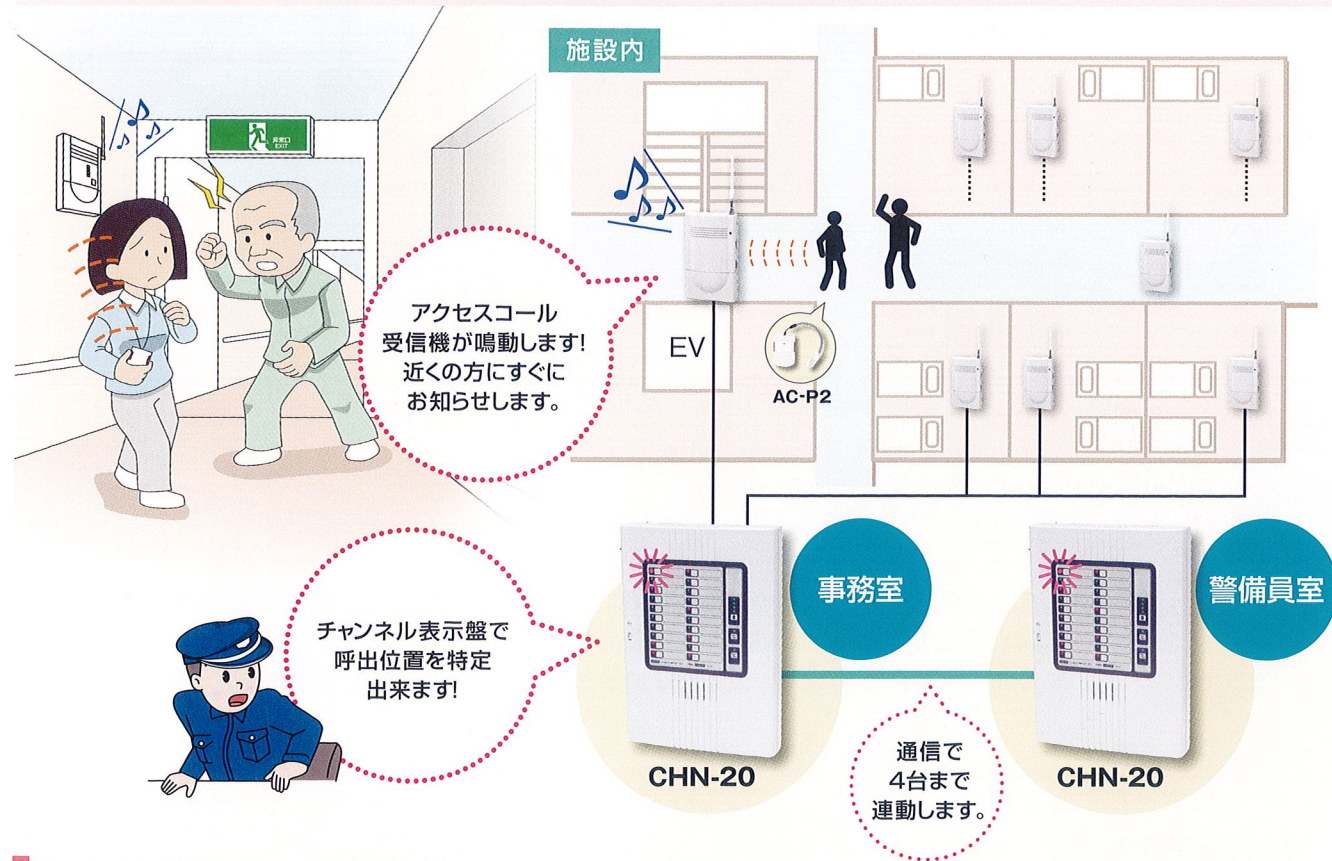

微弱電波シリーズ製品紹介

アクセスコール送信機 握り押しボタン型 AC-P2 (16,000円) ● 2ボタン同時押タイプです。 ● 市販コイン電池1個で約5年使用できます(1日80回送信使用として)。 ● クリップ付ストラップ、首掛ひもの付属品付きです。	アクセスコール送信機 押ボタン型 AC-PT (16,000円) ● 市販コイン電池1個で約4年使用できます(1日10回送信使用として)。 ● 日常生活防水構造。 ● 重さ18gの小型軽量タイプ。 ● リストバンド・クリップ付ストラップ・首掛ひもの3つの付属品が付いています。	アクセスコール送信機 据置型 AC-WT (16,000円) ● 個室などでこたつの上などに置いて使用します。 ● 日常生活防水構造。 ● トイレや浴室などにも設置可能。 ● 連続送信できます。 ● 誤作動防止カバー付です。
アクセスコール受信機 AC-1R (48,000円) ● 送信機が発信する電波信号を受信し、無電圧リレー接点及びデータを出します。 ● 受信感度ボリュームで感度調整が可能。 ● 外部出力タイマーボリュームで出力時間の調整が可能(オフディレイ動作)。 ● 報知音: ch1:ピンポン ch2:ブルブル ch3:ポロロン ch4:ブー ● システム拡張用データ出力機能を内蔵(AC-1RH、AC-3RHに接続可能)。 ● AND入力端子を設けています。 ● 電源及び出力の2色LED付。 ● 設置場所: 屋内(壁掛け)	アクセスコール受信機 AC-4R (48,000円) ● 環境診断機能付。 ● 送信機とアドレス、チャンネルコードを合わせることで4種類の個別接点が得られます。 ● 出力時間はワンショット(3秒)と保持モードに切り替えられます。 ● 保持モード時本体スイッチおよびメーク入力でリセットできます。 ● AND入力端子を設けています。 ● 報知音: ch1:ピンポン ch2:ブルブル ch3:ポロロン ch4:ブー ● 4種類のLED表示灯及び出力付。 ● 電源LED表示付。	アクセスコール受信機 AC-8R (48,000円) ● アクセスコール送信機シリーズと組み合わせて使用します。 ● 送信機が発信する電波を受信し、無電圧a接点およびデータ出力します。 ● 内部チャンネルコードスイッチ設定で、必要な送信機だけ受信して出力動作を行うことができます。 ● システム拡張用データ出力機能を内蔵(AC-1RH、AC-3RHに接続可能)。 ● AND入力端子を設けています。 ● 出力赤LED表示付。 ● 設置場所: 屋内(天井面・壁面)

ワイヤレス(小電力)シリーズ


小電力電波
100mタイプ

ワイヤレス緊急呼出し


特長

- 送信機のボタンを押すと100m離れた場所にワイヤレスでお知らせします。
- 配線工事不要で、簡単に設置できます。
- ご家庭から大規模施設までご利用できます。


システム

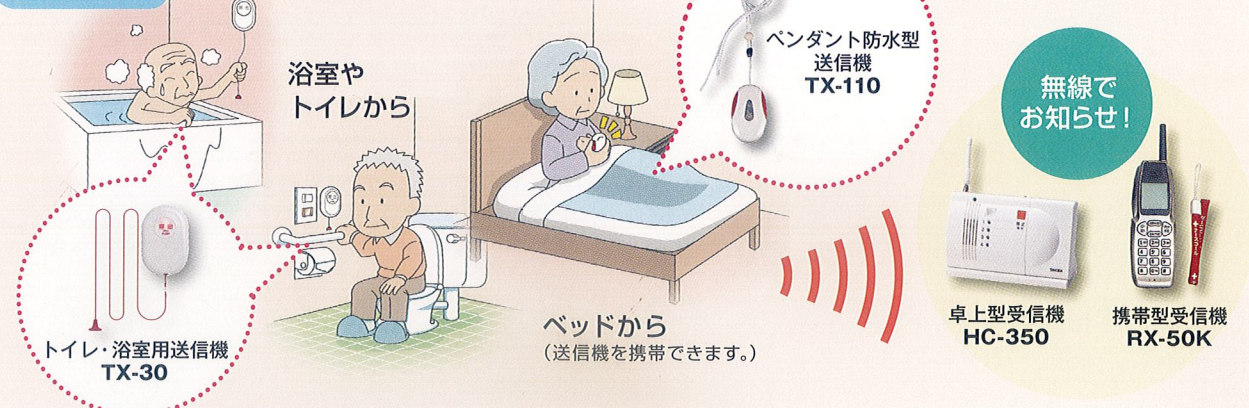


用途例1 点滴室などで、呼出ボタンのない場所に

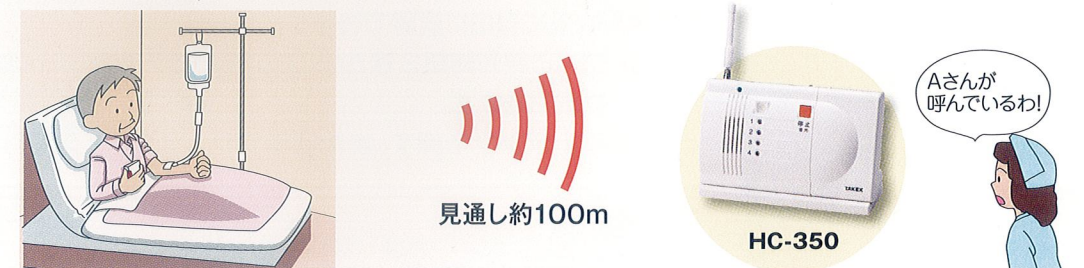

用途例2 緊急病棟など、新たに配線を引けない場所に

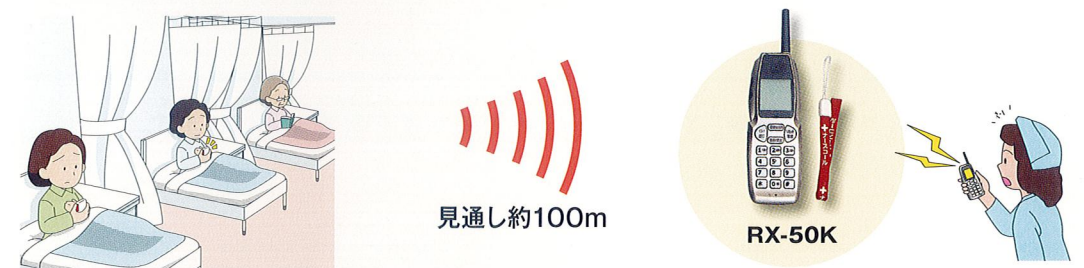


用途例3 ご家庭内の緊急呼出に

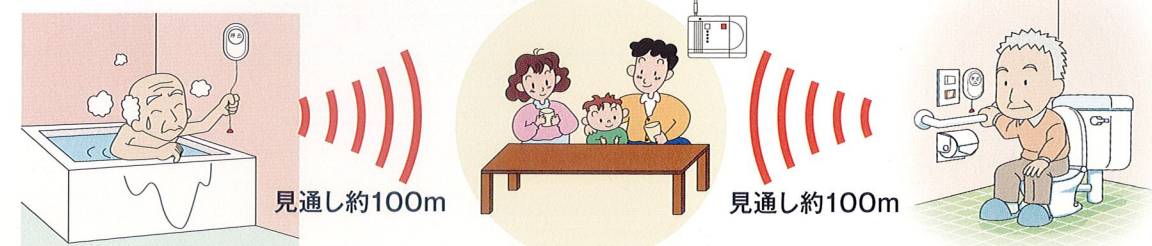


外形寸法図 仕様一覧表 (単位: mm)

AC-1R

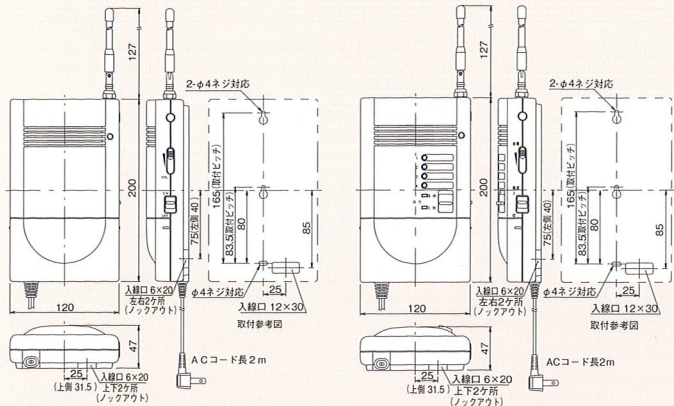


AC-4R

AC-8R

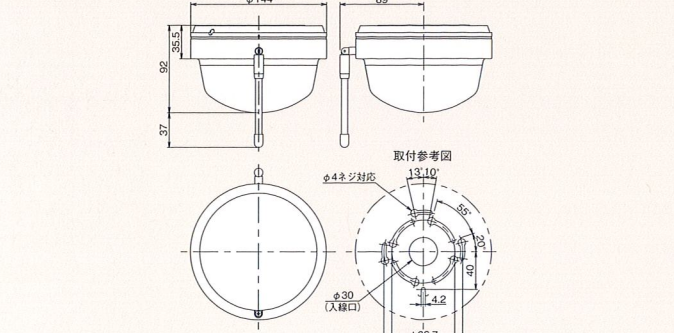

AC-P2

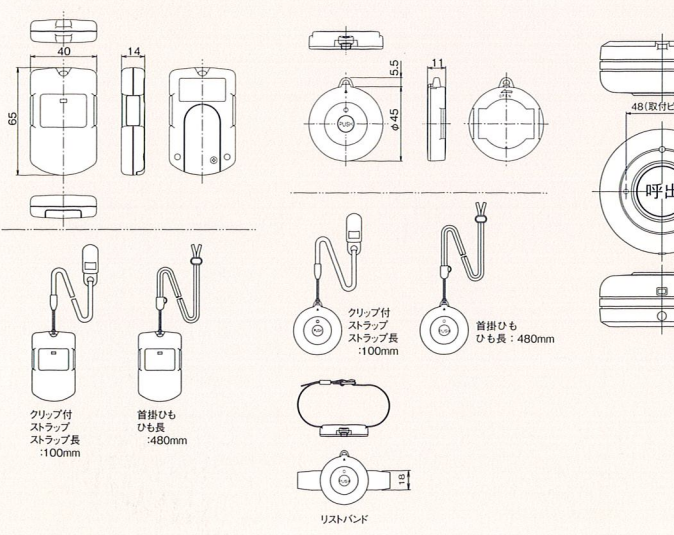


品 番	AC-1R	AC-4R
電 源 電 圧	AC100V・50/60Hz 7W 又はDC10~16V 200mA	AC100V・50/60Hz 7W 又はDC10~16V 220mA
受 信 周 波 数	315.8MHz	
受 信 方 法	スーパーヘテロダイナ方式	
空 中 線	Fプラグ付ヘリカルアンテナ	
最大検知距離	最大8m(推奨検知距離:2m以下)	
送信機選別コード	アドレスコード:16通り	
A N D 入 力	無電圧リレー接続 a接続/b接続切替式 接続ON抵抗 200Ω以下	
リセット入力	—	
外 部 出 力	接続方式:無電圧リレー接続(c接続) 接続容量:30V(AC/DC)1A以下 抵抗負荷 データ出力	総合出力:無電圧リレー接続(c接続) 30V(AC/DC)1A以下 抵抗負荷 個別出力:無電圧半導体リレー(a接続)×4 24V(AC/DC)0.3A以下 抵抗負荷
電 源 出 力	DC12V 60mA(AC100V 供給時)	
表 示 灯	動作表示灯 通電時:緑色点灯 動作時:赤色点灯 受信表示灯 3秒モード:緑色点灯 保持モード:橙色点灯 環境表示灯 赤色	電源表示灯 通電時:緑色点灯 出力表示灯 3秒モード:緑色点灯 出力設定表示灯 3秒モード:緑色点灯 保持モード:橙色点灯 環境表示灯 赤色
操 作 ス イ ャ	電源スイッチ AND入力切替スイッチ アドレスコード設定スイッチ	電源スイッチ 出力設定スイッチ AND入力切替スイッチ アドレスコード設定スイッチ
報 知 音	チャイム音 1ch:ピンポン 2ch:ブルブル 3ch:ボロロン 4ch:ブー	
音量調節範囲	0(無音)~70dB(前方1mにて)	
出力タイマー時間	約3秒~3分間	
配 線 接 続	端子式 ACコード付き(2m)	
使用可能周囲温度	-10℃~+50℃	
設 置 場 所	屋内:壁面(1個用スイッチボックス対応)	
質 量	約650g	約690g
外 観	ABS樹脂(ホワイト)	


品 番	AC-8R
電 源 電 圧	AC100V(50/60Hz)・2W 又はDC10~16V 80mA
受 信 周 波 数	315.8MHz
受 信 方 法	スーパーヘテロダイナ方式
空 中 線	ヘリカルアンテナ
最大検知距離	最大8m(推奨検知距離:2m~3m以下)
送信機選別コード	アドレスコード:16通り
出 力	●外部出力:接続方式:無電圧接続(a接続) 接続動作:受信時間+約3秒間出力 接続容量:AC/DC24V・0.3A(抵抗負荷) ●データ出力
A N D 入 力	●無電圧接続(a接続) 接続ON抵抗 200Ω以下
電 源 出 力	DC12V・60mA(AC100V 供給時)
表 示 灯	●外部出力表示灯 赤色(受信時間+約3秒間点灯)
操 作 ス イ ャ	●外部出力表示灯ON/OFFスイッチ ●外部出力チャンネル設定スイッチ ●アドレスコード設定スイッチ
配 線 接 続	端子式
使用可能周囲温度	-10℃~+50℃
設 置 場 所	屋内:天井・壁面取付
質 量	約320g
外 観	PE・ABS樹脂(ホワイト)
付 属 品	タッピングネジ φ4×35mm 2本

品 名	握りボタン型 送信機	押ボタン型 送信機	据置型送信機
品 番	AC-P2	AC-PT	AC-WT
電 源 電 圧	DC3V (コイン形リチウム電池 CR2032×1)	DC3V (コイン形リチウム電池 CR2032×1)	DC3V (単4形アルカリ電池 LR03×2)
消費電流	待機時0.5μA 以下 送信時6.5mA 以下	待機時0.5μA 以下 送信時5mA 以下	待機時0.5μA 以下 送信時6.5mA 以下
電池寿命	約5年	約4年	●約2年 (1日500回以下の 送信動作時) ●約500時間 (連続送信状態 にて)
使用周波数	315.8MHz 500μV/m以下(3mにて)		
電波到達距離	約8m		
電波方式	微弱電波型		
送信時間	押ボタンON時間+約2秒	●押ボタンON時間 +約2秒 ●一度ONすると リセットスイッチ を押すまで送信	
アドレスコード	16通り		
チャンネルコード	15通り		
使用可能周囲温度	-10℃~+50℃		
防水構造	非防水	日常生活防水	
付属品	ストラップ、 首掛ひも	リストバンド、 首掛ひも、 ストラップ	ゴム足、 粘着シール
質 量	約25g (電池含む)	約18g (電池含む)	約140g (電池含む)
外 観	ABS樹脂(ホワイト)		


TX-110

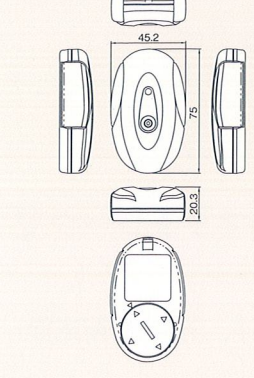

TX-30

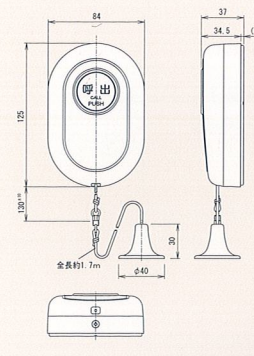

HC-350

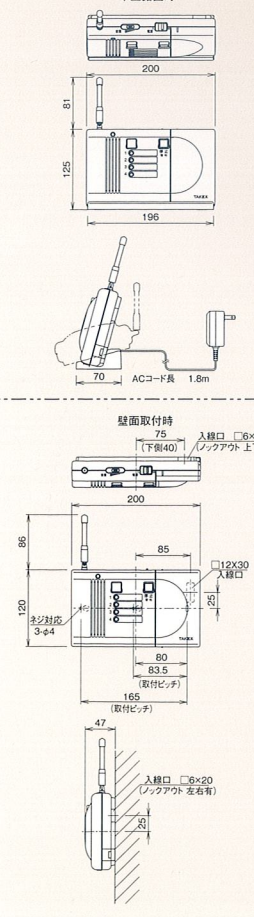


品 番	TX-110
タイプ	ペンダント型
電 源 電 圧	DC3V (ボタン型アルカリ電池LR44×2)付属
電池寿命	約2年(1日10回送信として) ※電池寿命は常温時での運用における 目安であり、保証値ではありません
使用周波数等(出力)	426MHz帯(3mW以下)
電波到達距離	約100m(見通し距離)
付 帯 機 能	ワンショット送信/ 連続送信切替機能・ 電池切れ報知機能・定期送信機能
使用可能周囲温度	-10℃~+50℃
質 量	約45g(電池、ネックストラップ含む)
外 観	ABS樹脂(ホワイト)
付 属 品	・ボタン型アルカリ電池(LR44)×2 ・ネックストラップ


品 番	TX-30
電 源	DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2
電池寿命	約5年(常温時、1日10回送信として) ※電池寿命は常温時での運用における 目安であり、保証値ではありません
使用周波数	426MHz帯
電波到達距離	100m以内(見通し距離)
付 加 機 能	・ワンショット送信 ・電池切れ報知機能 ・定期送信機能
質 量	約170g(電池含む)
外 観	ケース:ABS樹脂(ホワイト)(抗菌仕様) ひも:ポリエステル(レッド)(抗菌仕様) 握りゴム:シリコン(レッド)(抗菌仕様)
付 属 品	・単4形アルカリ乾電池×2 ・取付ネジ×2 ・呼出ステッカー×1 ・登録No.ステッカー×1

品 番	HC-350
電 源 入 力	AC100V 50/60Hz
消費電力	14VA
使用周波数帯	426MHz帯 (小電力セキュリティシステムの無線設備)
空 中 線	λ/4 ホイップアンテナ
受信可能距離	約100m(見通し距離)
外 部 出 力	接続方式:無電圧c接続 AC/DC 30V・0.5A 接続動作:ワンショット動作(約3秒)
報知強制停止入力	接続方式:a接続
電 源 表 示 灯	通電時:点灯
緑 色 L E D	電池切れ信号受信時:点滅
チャンネル表示灯	検知信号受信時:点灯(設定時間) メモリー時:点灯
赤 色 L E D	電池切れ信号受信時:点滅 受信感度減衰時:点滅 登録動作中の チャンネル移行時:点滅
操 作 音	電池切れ発生時:「ビビ」報知中に鳴る モード移行時:「ビー」 登録削除時:「ブー」 登録エラー時:「ブー」
報 知 音	「ピンポンパンパン」 「ブルブルブルブル」 「ボロロロン」 エリゼのために アニーローリー むすんでひらいて ローレライ 大きな栗の木の下で
ボリュームにて可変	(0~75dB)
※1~4チャンネルに設定可能	
送信機登録可能台数	30台
配 線 接 続	端子式
使用可能周囲温度	-10℃~+50℃
付 帯 機 能	報知時間切替機能 電池切れ異常報知機能 メモリー切替機能
設 置 場 所	屋内、卓上据置・壁掛け式
質 量	約570g
外 観	ABS樹脂(ホワイト)


TX-122

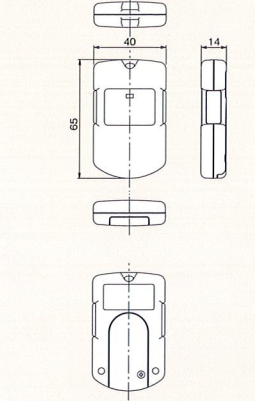

TX-113

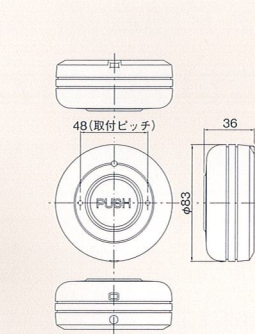


RX-50K

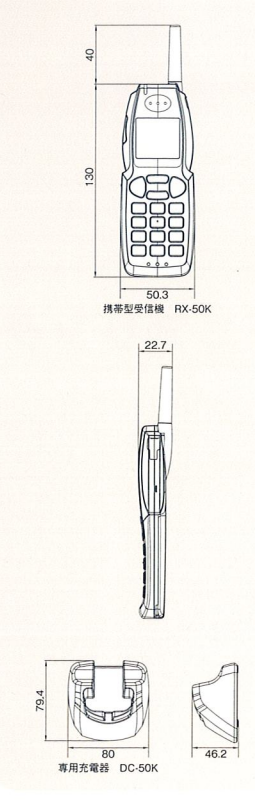

品 番	TX-122
電 源 電 圧	DC3V(コイン形リチウム電池(CR2032)×1)
電池寿命	約2年(1日10回送信・常温時) ※電池寿命は常温時での運用における 目安であり、保証値ではありません
送信周波数帯	426MHz帯 (小電力セキュリティシステムの無線設備)
送 信 出 力	3mW以下
空 中 線	内蔵型
電波到達距離	100m以内(見通し距離)
表示灯(赤色LED)	送信時:点灯 電池切れ報知時:点滅
使用可能周囲温度	-10℃~+50℃ (0℃以下では電池の機能が低下する場合があります)
付 帯 機 能	ワンショット送信/連続送信切替機能・ 電池切れ報知機能・定期送信機能
使用可能周囲温度	-10℃~+50℃
質 量	約25g(電池含む)
外 観	ABS樹脂(ホワイト、レッド)
付 属 品	・コイン形リチウム電池(CR2032)×1 ・首掛ひも

品 番	TX-113
電 源	単4形アルカリ乾電池2本(DC3V)
電池寿命	約5年(常温時、1日10回送信として) ※電池寿命は常温時での運用における 目安であり、保証値ではありません
使用周波数帯	426MHz帯 (小電力セキュリティシステムの無線設備)
出 力	10mW以下
電波到達距離	100m以内(見通し距離)
空 中 線	内蔵型
表示灯(赤色LED)	送 信 時:点灯 電池切れ時:点滅
設 置 場 所	屋内・屋外
使用可能周囲温度	-10℃~+50℃
防 水 性	日常生活防水構造
付 帯 機 能	・ワンショット送信/連続送信切替機能 ・電池切れ報知機能 ・定期送信機能
質 量	約140g(電池含む)
外 観	ABS樹脂(ホワイト)
付 属 品	・単4形アルカリ電池×2 ・取付ネジ×2・ゴム足×4 ・粘着シート

品 番	RX-50K
電 源 電 圧	DC3.7V(充電式リチウムイオン電池)
連続使用時間	約50時間(待機状態にて) ※警報動作が多い程、 使用時間が短くなります
充 電 時 間	電源OFF時 約8時間 電源ON時 約10時間
使用周波数帯	426MHz帯 (小電力セキュリティシステムの無線設備)
空 中 線	ヘリカルアンテナ
受信可能距離	約100m(見通し距離)
液 晶 表 示	警報発生時に表示(メモリー機能あり) 登録、消去、点検、確認など操作時に表示(キー操作後10秒間バックライト点灯)
警 報 充 電 表 示 灯	2色LED 警報(タンパー)発生時:赤点灯 充電完了後:緑点灯
内 蔵 プ ザ ー	警報(タンパー)発生時:「ビビビビ」約20秒 (オフディレイ動作) 音量「大」「中」「小」「無音」の4段階に設定可能 各キー操作時:「ビ」 音量固定式 点検モード時:「ブ」 音量固定式 登録エラー時:「ブ」
バイブレーション機能	警報(タンパー)発生時:音量「無音」設定時に動作
警 報 接 点 出 力 (総 合)	警報(タンパー)発生時:無電圧半導体出力、a 接続動作(オープン・ イン出力DC5V・30mA 以下、極性あり) 約20秒 (オフディレイ動作) 但し保持タイプ送信機(接続入力型送信機) からの信号やタンパー信号受信時は送信機 の接点の状態に同期して動作
警報音出力機能	警報(タンパー)発生時:出力端子より警報音 「ビビビ」が出力
送信機登録可能台数	50台
本 体 タ ン パ ー	なし
メ モ リ ー 機 能	あり(但し電源をOFFするとクリアされる)
使用可能周囲温度	0℃~+45℃
質 量	約84g
外 観	ABS樹脂(パールシルバー色塗装)
付 属 品	・専用充電器 専用電池

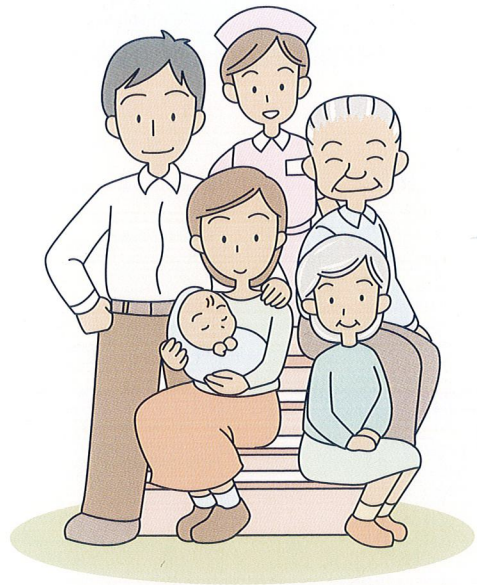

全国
ネットワーク
です。

工事店・代理店は全国レベルのネットワークで
対応しています。

■このカタログに掲載の商品の価格には、消費税・配送費・
工事費などは含まれておりません。

お問い合わせ

ヘルスケア事業部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1

TEL (075)593-3172 (直通) FAX (075)501-2085 (直通)
E-mail hcd@takex-eng.co.jp

URL <http://www.takex-eng.co.jp/>

⚠ 安全に関するご注意

ヘルスケア用システム機器商品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

■品質保証とアフターサービス

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフター
サービス体制を整えています。

■保守点検

本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけ
てください。

■おことわり

- 弊社の商品は、快適な生活をお手伝いするヘルスケア用機器で医療用機器、災害防止用機器、人身事故防止機器ではありません。ご使用上で、万一発生した人身事故、災害事故、施工上の不備などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本商品の取り付け、取りはずし時の事故で発生した怪我、損害については弊社は一切責任を負いません。
- 本商品の取り付け、取りはずしによる建物などへの損傷についても弊社は一切責任を負いません。
- 地震・雷（誘導雷サージを含む）および弊社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 本商品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（事業利益の損失、事業の中断、記憶内容の変化・消失、通信機会の消失など）に関して、弊社は一切の責任を負いません。
- 保守点検や施工上の不備、取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 弊社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作（誤報・失報を含む）などから生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 本商品に関し、いかなる場合も弊社の費用負担は、本商品の価格内とします。

竹中センサーグループ



竹中エンジニアリング株式会社

ヘルスケア事業部

事業本部	〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1	TEL(075)594-7211(代)	FAX(075)501-2085
札幌営業所	〒060-0052 札幌市中央区南二条東2-9(大都ビル)	TEL(011)281-4641(代)	FAX(011)281-4642
仙台営業所	〒980-0802 仙台市青葉区二日町16-1(二日町東急ビル)	TEL(022)268-2411(代)	FAX(022)268-2413
郡山営業所	〒963-8041 郡山市富田町字坦ノ腰58-1(第2ヨコヤマビル)	TEL(024)962-4310(代)	FAX(024)962-4311
高崎営業所	〒370-0848 高崎市鶴見町1-1(三井生命高崎ビル)	TEL(027)327-3981(代)	FAX(027)310-8577
さいたま営業所	〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町2-389(フジックス桜木町ビル)	TEL(048)653-7531(代)	FAX(048)653-7532
千葉営業所	〒260-0016 千葉市中央区栄町35-14(FCC千葉ビル)	TEL(043)202-2551(代)	FAX(043)202-2552
東京営業所	〒113-0033 東京都文京区本郷1-11-14(小倉ビル)	TEL(03)5805-8081(代)	FAX(03)5805-8082
立川営業所	〒190-0023 立川市柴崎町3-18-30(東財バスターミナル立川)	TEL(042)540-1665(代)	FAX(042)540-1666
横浜営業所	〒220-0033 横浜市港北区新横浜3-24-5(ユニオンビルANNEX)	TEL(045)471-8467(代)	FAX(045)475-2912
長野営業所	〒380-0906 長野市鶴賀七瀬548-1(ヤマギシビル)	TEL(026)229-8130(代)	FAX(026)229-8133
静岡営業所	〒422-8062 静岡市駿河区堀川3-1-25(ラリヘルテック2F-B号)	TEL(054)203-5220(代)	FAX(054)203-5219
名古屋営業所	〒464-0075 名古屋市中千種区内山3-12-14(豊島不動産ビル)	TEL(052)731-7227(代)	FAX(052)731-7225
金沢営業所	〒920-0853 金沢市本町2-7-1(越田ビル)	TEL(076)234-7201(代)	FAX(076)234-2401
京都営業所	〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1	TEL(075)593-3171(代)	FAX(075)591-5422
大阪営業所	〒530-0045 大阪市北区天神西町5-17(アクティ南森町)	TEL(06)6360-6881(代)	FAX(06)6360-6882
神戸営業所	〒651-0085 神戸市中央区八幡通3-2-11(芙蓉ビル東館)	TEL(078)230-6112(代)	FAX(078)230-6113
広島営業所	〒730-0013 広島市中区八丁堀1-2-22(築地ビル)	TEL(082)223-1138(代)	FAX(082)223-1755
高松営業所	〒760-0007 高松市中央町1-26(藤沢ビル)	TEL(087)861-6633(代)	FAX(087)861-6608
福岡営業所	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-1-33(はかた近代ビル)	TEL(092)471-6245(代)	FAX(092)481-1362
熊本営業所	〒862-0954 熊本市神水1-8-8(フォレストビル)	TEL(096)387-3911(代)	FAX(096)387-3884
U.S.	(California) TAKEX AMERICA INC.	TEL 408-747-0100	FAX 408-734-1100
U.K.	(London) TAKEX EUROPE LTD.	TEL 01256-475555	FAX 01256-466268
A.U.S.	(Melbourne) TAKEX AUSTRALIA.	TEL 03-9546-0533	FAX 03-9547-9450

<http://www.takex-eng.co.jp/>

●仕様など予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。●このカタログの記載内容は'11年9月現在のものです。

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、
当社にご相談ください。

■販売店名■